

1. ご使用のポイント

(成人用パッド CPR-D-padz 接続時)


ZOLL AED Plus®

●このガイドは必ずAEDとともに保管してください。

ポイント1 一体型の成人用パッド

1 センサーで位置決め

加速度センサー部を胸の真ん中に置きます。

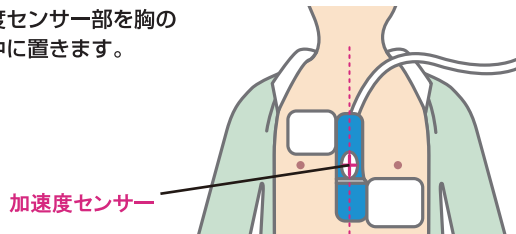

2 タブを引っ張り装着


加速度センサー部を手でおさえながらタブを引っ張り電極パッドから保護紙をはがし、しっかり貼ります。



ポイント2 胸骨圧迫ヘルプ機能


1 胸骨圧迫深度インジケーター

胸骨圧迫の深さ5cm～6cmが目盛り表示され、実際の圧迫の深さが棒グラフで表示されます。これで圧迫深度が適切であるかわかります。

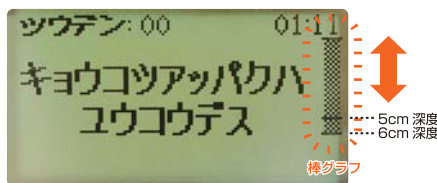


2 胸骨圧迫リズム音

胸骨圧迫時に発するリズム音により、100回/分の圧迫速度に誘導します。

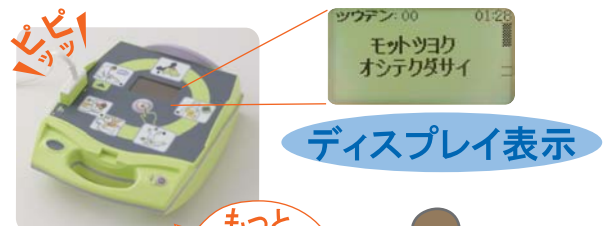

3 音声案内・メッセージ表示

『もっと強く押して下さい!』 もっと強く押してください! 『胸骨圧迫は有効です!』などの音声案内とメッセージ表示があり、適切な胸骨圧迫をサポートします。

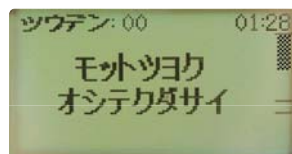

⚠ ZOLL AED Plus® 使用時の注意点

- 未就学児への成人用パッド(CPR-D-padz)の使用は、小児用パッド(pedi-padz II)が近くに無いなど、やむを得ない場合に限りしてください。その際は、音声案内にかかわらず、胸骨圧迫の適切な深さは胸の厚みの約1/3です。
- 小児用パッドを使用する場合、胸骨圧迫の深さ、速さは測定されません。
- 成人用パッドは傷病者の身体の大きさに応じて加速度センサー部から下方のパッドを切り離して使用できます。その際は、2枚のパッドが触れ合わないようご注意ください。

ガイドライン
2015対応

↑ AED Plusは耳が不自由な方にもご使用いただけます

2. 救命の流れ

ZOLL® AED Plus®

AEDが到着するまで

1 反応の確認→助けを呼ぶ→呼吸の確認
(119番通報・AEDの手配)



2 胸骨圧迫

正常な呼吸が認められない場合は、ただちに胸の真ん中(胸骨の下半分)を「強く」「速く」「絶え間なく」押しします。

成人

約5cm押す
(6cmを超えない)
100-120回/分のテンポで押す



未就学児

胸の厚さの約1/3の深さまで押す



※できる方は人工呼吸も



気道を確保



胸骨圧迫30回と人工呼吸2回を繰り返して行います

AEDが到着するまで **2** を続けます


AEDが到着したら

3 電源オン




4 パッド装着

成人用パッド
(小学生以上)

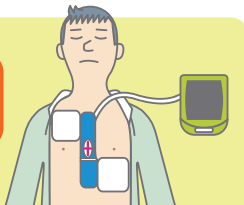


小児用パッド
(未就学児)

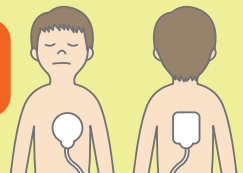


成人用パッド装着の特殊例

●体が大きい場合

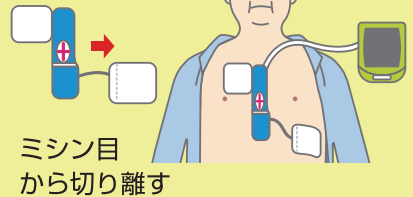


●女性の場合

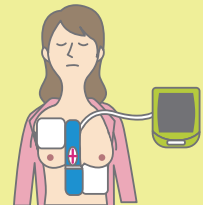

●未就学児にやむを得なく装着する場合

前後に装着

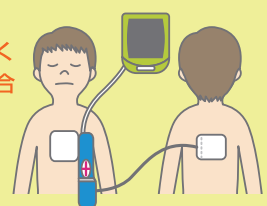

5 電気ショック

ショックの要否は音声案内に従う



6 胸骨圧迫

加速度センサー部を押す
音声案内に従う(5cm以上100回/分に誘導します)



未就学児の場合は、AEDの音声案内にかかわらず、胸の厚みの約1/3の深さまで押しします。

※できる方は人工呼吸も



気道を確保



胸骨圧迫30回と人工呼吸2回を繰り返して行います

【選任製造販売業者】

旭化成ゾールメディカル株式会社

0800-222-0889 (旭化成AEDコールセンター)

〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1 興和西新橋ビル
tel.03-6205-4544 fax.03-6205-4923

医療機器承認番号: 22200BZ100015000

一般的名称: 非医療従事者向け自動除細動器

販売名: ZOLL AED Plus 半自動除細動器

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器

PL-E011306 Rev.6.0