



点検表

AED-3150/AED-3151

製造番号:

※コピーしてお使いください。 ※点検結果の記録は、直近3ヶ月程度の保管が望ましいとされています。

毎日の点検

ステータスインジケータが緑色に表示していることを確認します。

表示色に
チェック
します。 緑
赤

年 月

日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
緑 <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/>						
緑 <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/>						
緑 <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/>						
緑 <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/>						
緑 <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/>						
緑 <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/>						

毎月の点検

最新の点検日 次回の点検予定日

ブザー、ランプ、ステータスインジケータ、 スピーカ、スイッチ、画面の点検

- 電源をオンにしたとき、全てのランプが点灯する
- ステータスインジケータの点検
- 音声ガイドが聞こえる
- 画面にイラストとメッセージが表示される
- バッテリ残量ランプの確認
 - 緑点灯_個
 - 赤点灯
- ショックボタンを押すと、“ピッ”と音がする
- 成人・小児モード切替スイッチを切り換える

使い捨てパッド (定期交換部品)

- 使い捨てパッドが接続されている
 - 使用期限
- 予備の使い捨てパッドがある
 - 使用期限

バッテリーパック (定期交換部品)

- バッテリーパックが取り付けられている
 - 待機寿命
 - 使用開始期限
 - バッテリー装着日

外観の確認

- ひびや割れ、がたつきがない
 - 最新の点検日
 - 次回の点検予定日

付属品の確認

- 付属品がそろっている
 - 最新の点検日
 - 次回の点検予定日