

レンタルします

国内シェアNO.1メーカー日本光電製

AKT/O

アクティオ

-自動体外式除細動器- AED-3150

日本光電のAED-3150は、
選ばれるポイントがたくさん詰まった安心の国内開発・製造のAEDです。

“分かりやすく、使いやすい”を 追求したAEDです。



音声とカラーイラスト画面で
とにかく分かりやすい！

音声ガイドに加え、屋外でも見やすい3.5型高輝度カラー画面によるイラスト・メッセージ表示で操作の確認が可能です。音声ガイドが聞き取りにくい環境下や、耳の不自由な方も操作できるようサポートします。



成人・小児モード
切替スイッチ搭載！

パッドは成人・小児共通。
内部スイッチを切り替えるだけで
小児から成人まで対応します。

過酷な状況下でも安心の
防塵・防水性能！

-5℃～+50℃の環境でも操作可能。
またIP66に準拠した高い防塵・防水
性を備えているので、過酷な状況下
でも問題ありません。

各種承認番号


販売名：自動体外式除細動器 AED-3100カルジオライフ
商品コード：AED-3150
医療機器承認番号：22700BZX00187000
クラス分類：高度管理医療機器、特定保守管理医療機器

販売名：使い捨てパッド P-740シリーズ
届出番号：13B1X00206000345
クラス分類：一般医療機器、体表用除細動電極

救急車が到着する前に、1分でも1秒でも早く
電気ショックを実施することが重要です。

電気ショック成功の可能性は、
1分ごとに7～10%低下

現在、救急車の到着時間は平均8.6分です。救急車が
到着した時点での電気ショックの成功率は約20%
まで低下してしまいます。

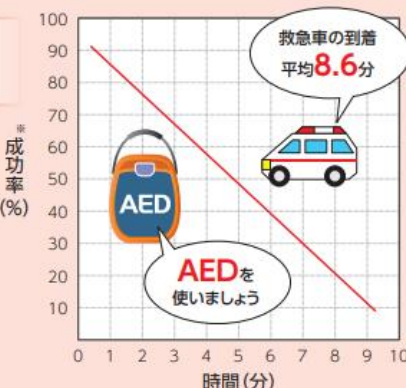

※成功率：ここでは生存して退院する可能性をいう。

だれでも簡単！ 3ステップ操作



Step 1
フタを開けると
電源ON



Step 2
パッドを
胸に貼る



Step 3
ボタンを押して
電気ショック

製品特徴

100回/分の動作音


電源ONと同時に100回/分の動作音を開始。AEDが動作状態であることを示すと同時に、絶え間ない胸骨圧迫の実施を促します。

録音機能を搭載

使用時は自動的に内部メモリに心電図や電気ショックを与えたデータ、周囲の音などを記録します。
※データを抽出するためには、専用ソフト（オプション）が別途必要です。

とっさの時も分かりやすく

電極パッドの色に合わせたカラー表示画面で、見やすさ・分かりやすさを向上しています。

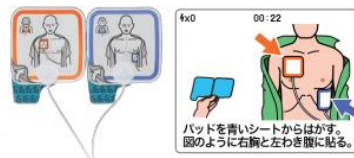

充実のセルフテスト

毎日/毎月のセルフテストで、電極パッドの断線などさまざまな項目を確認し、異常があった場合アラームでお知らせします。

毎日	バッテリー、パッド(使用期限、導通など)、内部電子回路、ステータスインジケータ回路、ショックボタン、ソフトウェア、温度 など
毎月	毎日のセルフテストの項目 + バッテリー(高負荷時の電圧)、高電圧回路(最大エネルギーでの充電)、スピーカー、心電図回路、LCD など

AED設置管理タグをよく見える所に！



忘れないで日常点検！

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したらいつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

アクティオがご提供するAEDには、「AED設置管理タグ」が付いております。タグには、バッテリーやパッドの使用有効期限が記載されておりますので、これらを利用し、いつでもAEDが使える状態にしておくことが大切です。



AED設置管理タグ

付属品

除細動パッド(使い捨て)、リチウムバッテリー(本体装着済)、リモート監視端末、収納ケース、レスキューキット、AED設置シール×2、取扱説明書、救命の手順、AED/使い捨てパッド解説書、AEDパッド期限登録ガイド、ポスター、弊社検査成績書

商品コード	RN2 00007 001
メーカー	日本光電株式会社
型式	AED-3150
電極パッド	使い捨てパッド P-740シリーズ
出力	切取型指数関数-定電力二相性波形 ActiBiphasic
エネルギー出力	漸増式 成人モード時…1回目：150J、2回目：200J、3回目：200J 小児モード時…1回目：50J、2回目：70J、3回目：70J
音声ガイド	日本語
メモリ	救助データ：3件90分（1件あたり最大30分）の心電図波形とイベント情報 セルフテスト履歴：毎日のセルフテスト31件、毎月のセルフテスト12件、その他のセルフテスト50件
バッテリー	バッテリーパック SB-310V リチウムバッテリー（充電不可） 待機寿命：4年（待機寿命は、設置環境や使用状況によって短くなります。） 容量：140回以上の除細動ショック、または5時間以上の動作（新品バッテリー20℃のとき）
録音	救助中の周囲の音を録音する
画面表示	カラーTFT液晶ディスプレイ アクティブエリア70.56×52.92mm（3.5型相当）
無線通信	Bluetooth®無線LAN
外装保護	IP66
耐用期間	8年間
寸法（幅×高さ×奥行）・質量	206×97×252mm・約2.4kg

・添付文書を必ずお読みください。

・AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時（高度管理医療機器等販売業の許可業者に限り）、廃棄時には、製造販売業者または販売業者にご連絡ください。

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

